

Art.Nr. 800115-01 1 x Actiremin Zahnpulver zur Remineralisierung Dose mit 38g

Für eine Actiremin Kur erforderliches Zubehör:

Art.Nr. 800215-02 2x Zahnschienen warmformend groß Breite ca. 65mm Länge ca. 50mm

Art.Nr. 800216-02 2x Zahnschienen warmformend klein Breite ca. 55mm Länge ca. 50mm

Wie funktioniert ActiRemin?

Actiremin dient zur Unterstützung der Remineralisierung von Zahnoberflächen. Die Remineralisierung wird aktiv angeregt, die Zahnoberflächen werden mit Bindungsmolekülen versorgt und belegt. Das Milieu der die Zähne umgebenden Flüssigkeiten (Pellicel und Speichel) soll vom sauren Bereich hin zu basischen Gleichgewicht verschoben werden. Dadurch wird die Remineralisierung aus den im Speichel vorliegenden Mineralien beschleunigt. **Wichtig:** Während der Behandlungsdauer Säuren durch Lebensmittel so gut als möglich vermeiden. Nach dem Essen oder Trinken die Mundhöhle mit Wasser spülen. Ein saures Milieu verstärkt die Demineralisierung und kann der Behandlung zuwiderlaufen.

Wie wird ActiRemin angewendet?

ActiRemin Pulver mit der feuchten, weichen Zahnbürste aufnehmen und auf die Zähne auftragen oder eine entsprechende Menge in die Zahnschiene einbringen. Anschließend die Zahnschiene über die Zahnreihe legen und das Pulver zusammen mit dem Speichel 30 Minuten einwirken lassen. Danach die Schiene entnehmen. Restliches Actiremin kann im Mund verbleiben, geschluckt oder ausgespült werden. Die natürlichen Bestandteile von Actiremin sind unbedenklich.

Tipp: immer nur eine Kieferhälfte pro Tag behandeln z.B. am 1. Tag den Oberkiefer, am 2. Tag den Unterkiefer, danach einen Tag pausieren. So haben die Zahnoberflächen zwei Tage lang ausreichend Zeit Mineralien aus dem Speichel einzulagern.

Anwendungsschema:

Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	u.s.w
Oberkiefer 30 Min.	Unterkiefer 30 Min.	Pause	Oberkiefer 30 Min.	2-3 Monate

Wie häufig und wie lange wird ActiRemin angewendet?

Die Anwendung soll regelmäßig über 2-3 Monate gem. o.a. Schema erfolgen. Achten Sie auf die Pause, damit die Mineralien aus dem Speichel zur Mineralisierung beitragen können. Ein häufigere Anwendung ist nicht sinnvoll und beschleunigt nicht die Wirkung. Sowohl bei der Menge des Pulvers als auch bei der Häufigkeit gelten die alten Grundsätze „mehr ist nicht mehr“ und „gut Ding will Weile haben“. Sowohl Demineralisierung als auch die Remineralisierung sind natürliche, langsam verlaufende Prozesse.

Nach der Kur kann ActiRemin ergänzend oder ausschließlich auch als Zahnputzmittel benutzt werden.

Andjana Medical Germany

Tharandter Str. 35

01159 Dresden

Informationen: service@andjana.de | Telefon 0351-329.961.09