

Kurvenkalibrierung Vitalchecker

1. Vorbereitung: PalmF ist kein intelligentes System, es unterstützt nicht, selbstständig im Internet zu surfen, daher stellen wir eine App als Brücke zwischen PalmF und dem Hipro-Server bereit. Für Android-Handys kann die App von der Website von Hipro heruntergeladen und installiert werden:

<https://www.ihipro.net/business/version/listApk.html>

Die neueste Version ist V1.1.2.

PS: Normalerweise erlaubt das Android-System nicht, neue Anwendungen direkt über den Browser zu installieren. Wenn der APK-Download abgeschlossen ist, sollten Sie die APK über den Datei-Manager ausführen. Für iPhone suchen Sie bitte im App Store nach „palmfbase“.

Wenn die App installiert ist, sehen Sie die App „PalmFBase“.

Das Symbol sieht wie folgt aus:



2. Schritt:

2.1 Bluetooth im PalmF einschalten. Drücken Sie die Powertaste 4 Mal schnell, PalmF wird in den Bluetooth-Modus wechseln, was bedeutet, dass Bluetooth "AN" ist.




2.2 Führen Sie die PalmFBase aus

Wenn die neue Standardkurve fertig ist, können Sie den Download durchführen. Tippen Sie zuerst auf die Einstelltaste, um die Sprache zu ändern.




Wählen Sie dann „PalmF“ aus, um in das nächste Interface zu gelangen.

Berühren Sie die Config-Taste, um nach Bluetooth

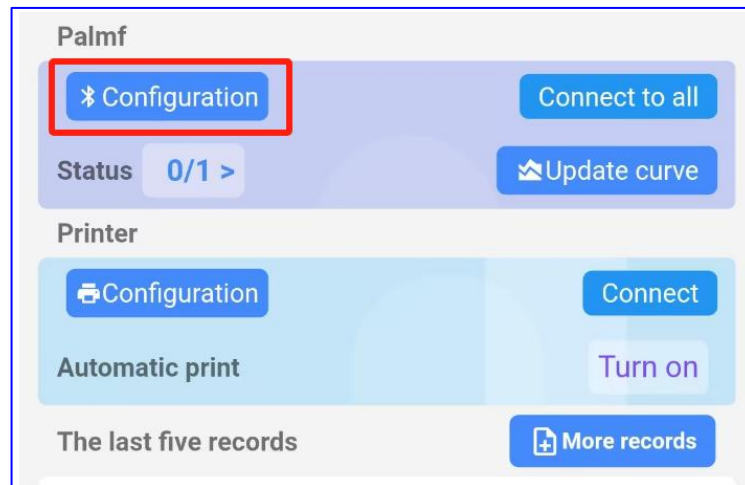


Signalen zu suchen.


PalmF-Signal wird da sein, fügen Sie es über Add zum Kontakt hinzu

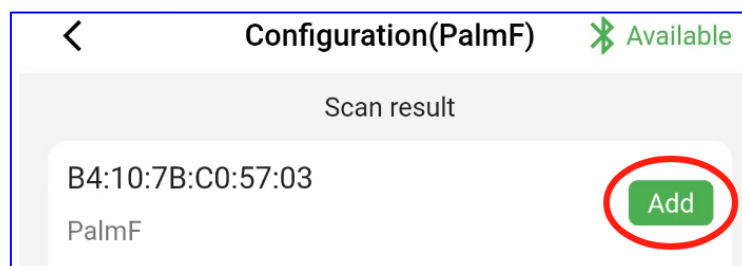


Wenn PalmF nach unten verschoben wird, können wir zurückkehren.

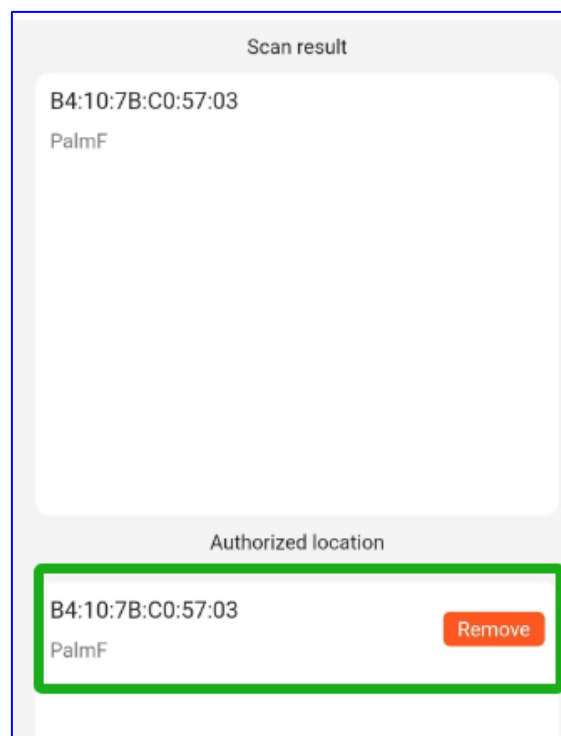


3. Aktualisierung: Bei der ersten Verbindung beginnt die Kurven-aktualisierung automatisch, während Sie zum Hauptinterface zurückkehren. Es dauert beim ersten Mal etwa 3 Minuten.

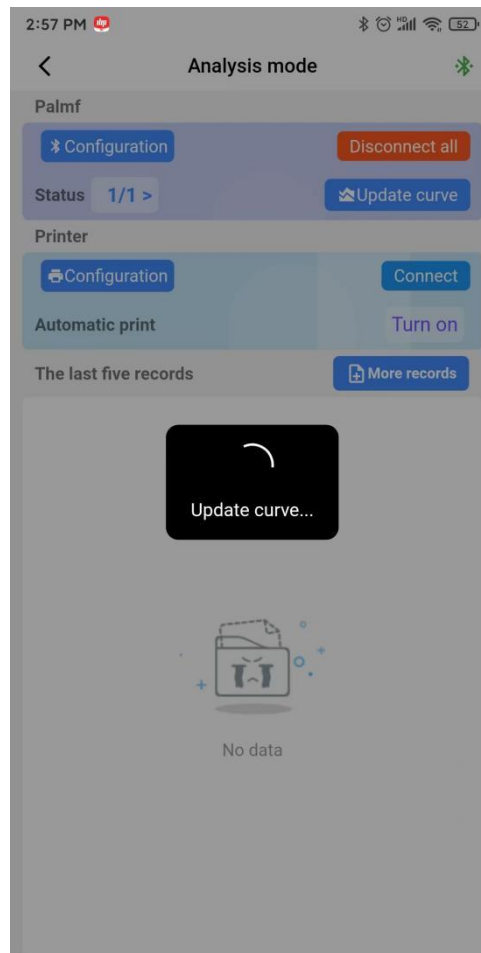

Sie können auch die Schaltfläche „Kurve aktualisieren“ berühren, um die Kurve erneut herunterzuladen.

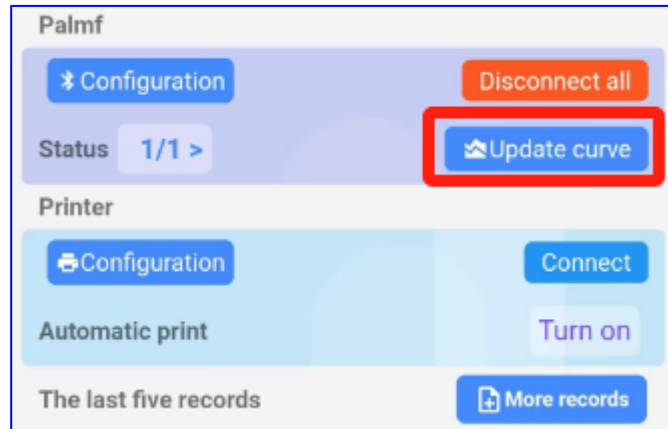

Das Gerät zeigt nach erfolgreicher Kalibrierung folgendes Bild an:

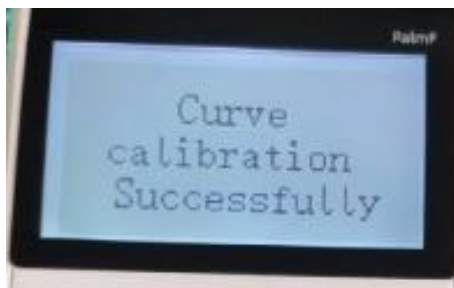

Der Hersteller empfiehlt ein **monatliches** Kurvenupdate.